



CoproELISA™ *C. difficile* GDH

Test ELISA pour la détection de *Clostridium difficile* Glutamate Déshydrogénase (GDH) dans les selles humaines.

Manuel d'instruction

Coffret de 96 tests
Référence catalogue: 784-01

Réservé au diagnostic *In Vitro*
A usage professionnel

A conserver entre 2 et 8°C. **Ne pas congeler.**



Savyon® Diagnostics Ltd.
3 Habosem St. Ashdod 7761003
ISRAEL
Tel. +972.8.8562920
Fax: +972.8.8523176
E-mail: support@savyondiagnostics.com

Utilisation

Le coffret Savyon CoproELISA™ *C. difficile* GDH est un test ELISA qui permet la détection de glutamate déshydrogénase (GDH) de *Clostridium difficile* dans les échantillons de selles prélevés chez des patients suspectés d'être infectés. Le test ne permet pas de distinguer les souches de *C. difficile* toxigènes des non toxigènes. Ce test est une aide au diagnostic de *C. difficile* et doit être complété par des tests supplémentaires afin de détecter les toxines produites par cette bactérie.

Réservé au diagnostic *In-Vitro*.

Introduction

Clostridium difficile, bactérie anaérobie gram positive est le principal agent responsable des diarrhées et colites pseudomembranaires associées aux traitements antibiotiques (1). Ce pathogène peut être à l'origine d'une maladie grave, voire fatale, si elle n'est pas diagnostiquée et traitée à temps. Le traitement aux antibiotiques représente le principal facteur de risque des infections à *C. difficile*. L'infection peut se développer si la flore gastro-intestinale est perturbée par un traitement antibiotique et si le patient est exposé à *C. difficile*; habituellement par voie oro-fécale (2). Les facteurs de virulence du *C. difficile* sont les toxines A et B (3, 4). Ces toxines présentent une forte homologie fonctionnelle et séquentielle. La toxine A a été décrite comme une entérotoxine qui endommage les tissus intestinaux ce qui attire les cellules neutrophiles et monocytes; et la toxine B est une puissante cytotoxine qui dégrade les cellules épithéliales du côlon (5). La plupart des souches virulentes produisent les deux toxines, cependant, les souches « toxine A négative et toxine B positive » provoquent également le développement


de la maladie (6,7). Toutes les souches de *C. difficile* produisent une importante concentration de GDH (8, 9). Pour cette raison, cette enzyme est considérée comme un excellent marqueur antigénique de cet *C. difficile*. Le test CoproELISA™ *C. difficile* GDH offre un diagnostic spécifique et sensible pour la détection de GDH dans les échantillons de selles. Un résultat positif confirme la présence de *C. difficile*; un résultat négatif indique son absence. Un test supplémentaire doit être effectué afin de détecter la présence de toxines dans l'échantillon.

Principe du test

CoproELISA™ *C. difficile* GDH est un test immunoenzymatique pour le dépistage de GDH dans les selles.

- Les puits des barrettes sécables de la microplaque sont sensibilisés par des anticorps monoclonaux dirigés contre la GDH de *C. difficile*.
- Un anticorps monoclonal anti-GDH conjugué à la peroxydase de raifort (HRP) est ensuite ajouté.
- Les échantillons de selles sont dilués dans le diluant échantillon et ajoutés dans les micropuits. A cette étape, la GDH de *C. difficile* est marquée avec le conjugué HRP et immobilisée par les anticorps fixés sur la microplaque.
- Le conjugué non fixé est éliminé par lavage.
- Après ajout de substrat TMB, ce dernier est hydrolysé par la peroxydase, donnant une solution bleue de substrat réduit.
- La solution d'arrêt est ensuite ajoutée, la couleur bleue devient jaune. Les puits sont lus à l'aide d'un lecteur ELISA à une longueur d'onde de 450nm/620nm.
- L'absorbance est proportionnelle à la quantité de GDH de *C. difficile* présente dans l'échantillon.

Résumé de la procédure manuelle / Automatisée

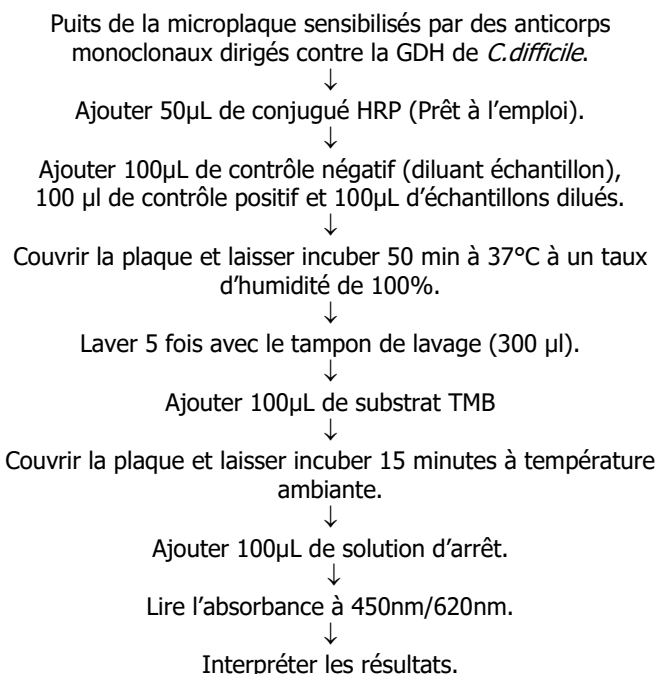

*Procédure automatisée:

- Pour une microplaque entière, remplir la plaque en 3 étapes (maximum 4 barrettes à la fois). Ajouter le conjugué-HRP sur 4 barrettes puis les échantillons

correspondant. Recommencer pour les 4 barrettes suivantes, puis les 4 dernières.

- Incubation des échantillons 30 minutes à 37°C.

Composition du coffret pour une utilisation manuelle /pour une utilisation sur automate.

Coffret de 96 tests:

1. **Microplaque sensibilisée par des anticorps monoclonaux dirigés contre la GDH de *C. difficile* :** 96 puits sécables (8x12) sensibilisés par des anticorps monoclonaux dirigés contre la GDH de *C. difficile* et conservés dans un sachet aluminium avec un déshydratant.

1 microplaque

2. **Tampon de lavage concentré (20x):** Tampon PBS-Tween

1 Flacon, 100 ml

3. **Diluant échantillon:** Prêt à l'emploi. Contient du Proclin <0.05% utilisé comme conservateur. Ce diluant est également à utiliser comme contrôle négatif (voir Procédure).

1 Flacon, 50 ml

4. **Conjugué HRP (vert):** Prêt à l'emploi. Contient des anticorps monoclonaux anti-GDH couplés à la peroxydase de raifort (HRP). Contient du Proclin <0.05% comme conservateur.

1 Flacon, 7 ml

5. **Contrôle positif :** Prêt à l'emploi. Contient des protéines GDH recombinées. Contient du Proclin <0.05% comme conservateur.

1 Flacon, 2.5 ml

6. **Substrat TMB:** Prêt à l'emploi. Contient 3,3', 5,5' tetraméthylbenzidine comme chromogène et du peroxyde comme substrat.

1 Flacon, 16 ml

7. **Solution d'arrêt:** Prêt à l'emploi. Contient de l'acide sulfurique 1M H₂SO₄.

1 Flacon, 16 ml

8. **Pipettes jetables en plastique:** **100 pc**

9. **Couvercle de microplaque:** **1 unité**

10. **Notice technique:** **1 unité**

Matériel nécessaire non fourni:

1. Tubes à hémolyse et portoirs pour préparer les dilutions de selles de patients.
2. Micropipettes ou pipettes multicanaux (50-200 et 200-1000µL) avec embouts jetables.
3. Bâtonnets jetables en bois/plastique ou spatules.
4. Eprouvette volumétrique d'un litre.
5. Eprouvette volumétrique de 50mL.
6. Bouteille pour la solution de lavage.
7. Papier absorbant.
8. Agitateur vortex.
9. Bain marie à 37°C avec couvercle ou une étuve à 37°C.
10. Lecteur ELISA équipé d'un filtre à 450nm et 620nm.
11. Eau distillée ou désionisée.
12. Pour **l'utilisation sur automate :** Utiliser une centrifugeuse possédant un rotor compatible avec les tubes d'échantillons.

Précautions d'emploi

1. Les réactifs doivent être ramenés à température ambiante avant utilisation.

2. Lors de la manipulation des barrettes éviter de rayer le fond des puits : ceci pourrait se traduire par une augmentation de l'absorbance.
3. Après utilisation, les échantillons de selles, les microplaques, les cônes de pipettes, les spatules et les tubes doivent être manipulés et éliminés comme des déchets biologiques potentiellement contaminés. Porter des gants lors du test.
4. **Les barrettes de la microplaque non utilisées doivent être replacées dans le sachet en aluminium refermable avec un déshydratant pour les protéger de l'humidité.**
5. La solution de substrat TMB est une substance irritante pour la peau et les muqueuses. Eviter tout contact direct.
6. L'acide sulfurique dilué (1M H₂SO₄) est un agent irritant pour les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Conservation et stabilité des réactifs

1. La date d'expiration des kits est indiquée sur l'étiquette du coffret. Les dates d'expiration de chaque composant sont indiquées sur leurs propres étiquettes. Le kit doit être conservé entre +2°C et +8°C et remplacé rapidement au réfrigérateur après utilisation. L'exposition des composants du kit pendant quelques heures à température ambiante n'altère pas les réactifs s'ils sont munis de leur bouchon d'origine ou restés scellés.
NE PAS CONGELER!
2. Le sachet d'aluminium contenant les barrettes de puits doit être soigneusement refermé avec le déshydratant et scellé avec du ruban adhésif sur toute la longueur de l'ouverture.

Recueil des selles

1. Recueillir et manipuler les échantillons selon les procédures standards de collecte et de culture des selles.
2. Conservation des selles: Le test n'est pas compatible avec des échantillons conservés dans 10% de formol ou dans de l'acétate de sodium formol (SAF). De même, ce test n'est pas compatible avec des échantillons conservés dans l'Alcool Polyvinyle (PVA).
3. Les échantillons doivent être conservés entre +2°C et +8°C et analysés dans les 48 heures après recueil. Si le test ne peut pas être exécuté dans les 48 heures, conserver les échantillons à -20°C ou moins.
4. Eviter les congélations/décongélations qui peuvent causer la dégradation/protéolyse des toxines, et par conséquent leur perte d'activité.

Procédure manuelle du test

A. Préparation des réactifs

1. Ramener tous les composants et les échantillons cliniques à tester à température ambiante. Déterminer le nombre total d'échantillons à analyser. Outre les échantillons, inclure les réactifs suivants dans chaque analyse : un puits de contrôle négatif (utiliser le Diluant Echantillon) et un puits de contrôle positif.
2. Retirer la microplaque de son sachet d'aluminium en coupant l'extrémité du sachet au niveau de la partie scellée. Prélever le nombre de barrettes nécessaires au test, les placer sur le support de 96 puits.
3. Diluer le tampon de lavage concentré au 1/20 avec de l'eau distillée.

Exemple: pour 1L de tampon de lavage : 50 ml de tampon de lavage concentré + 950 ml d'eau distillée

B. Traitement des échantillons

4. Préparer une dilution pour chaque échantillon à analyser. Utiliser des tubes Eppendorf de 1,5 ml. Ajouter 200 µl de Diluant Echantillon. Identifier le tube.
5. **Echantillons solides** Utiliser un bâtonnet en bois ou une spatule jetable pour transférer approximativement 0,1 à 0,15g de selle (à peu près la taille d'un petit pois) dans le Diluant Echantillon. Enlever autant de matière possible de la spatule ou du bâtonnet en mélangeant le Diluant Echantillon ; presser le bâtonnet contre la paroi du tube pour récupérer le liquide résiduel.
Echantillons liquides : transférer 150µL de selle dans le tube. S'assurer que l'échantillon est mélangé de manière homogène
6. **Bien mélanger (vortex) le tube pour assurer l'échantillonnage adéquat.**
7. Conserver l'échantillon dilué entre +2°C et +8°C jusqu'à analyse.

C. Incubation des échantillons et contrôles.

8. Distribuer 50µL de conjugué prêt à l'emploi dans chaque puits.
9. Déposer 100µL de contrôle positif et 100 µL de contrôle négatif (Diluant Echantillon) dans des puits séparés.
10. Déposer 100µL d'échantillons dilués dans des puits séparés grâce aux pipettes jetables fournies (marque la plus basse sur la pipette).
11. Recouvrir les barrettes avec le couvercle de microplaque et incuber 50 min à 37°C dans une étuve.
12. **Etape de lavage:** Vider les puits. Remplir chaque puits au maximum avec du Tampon de Lavage (300µL) Répéter cette étape 4 fois pour un total de **CINQ** lavages. Les laveurs automatiques peuvent être utilisés.
13. Sécher les barrettes et le portoir en les tapotant sur du papier absorbant.

D. Incubation du substrat TMB

14. Distribuer 100µL de substrat TMB dans chaque puits, recouvrir les barrettes avec le couvercle et incuber à température ambiante pendant **15 minutes**.
15. Arrêter la réaction en ajoutant dans chaque puits 100µL de solution d'arrêt (1M H₂SO₄).

E. Lecture

16. Lire la densité optique de chaque puits à 450nm/620nm au cours des 10 minutes suivant l'arrêt de la réaction, puis enregistrer les résultats.

Note: Les bulles d'air doivent être retirées avant la lecture. Le fond de la plaque doit être soigneusement essuyé.

Procédure pour une utilisation sur automate

A. Préparation des réactifs.

1. Ramener tous les composants et les échantillons à tester à température ambiante. Déterminer le nombre total d'échantillons à analyser. Outre les échantillons, inclure les réactifs suivants dans chaque analyse : un puits de contrôle négatif (utiliser le Diluant Echantillon) et un puits de contrôle positif.

2. Retirer la microplaque de son sachet d'aluminium en coupant l'extrémité du sachet au niveau de la partie scellée. Prélever le nombre de barrettes nécessaires au test, les placer sur le support de 96 puits.
3. Diluer le tampon de lavage concentré au 1/20 avec de l'eau distillée.Exemple: pour 1L de tampon de lavage : 50 ml de tampon de lavage concentré + 950 ml d'eau distillée.

B. Traitement des échantillons

4. Préparer un tube de dilution pour chaque échantillon à tester (utiliser des tubes compatibles avec l'instrument). Ajouter 800µL de Diluant Echantillon dans chaque tube. Identifier les tubes.
5. **Echantillons solides** : Utiliser un bâtonnet en bois ou une spatule jetable pour transférer approximativement 0,2 à 0,3g de selle (à peu près la taille de 2 petits pois) dans le Diluant Echantillon. Enlever autant de matière possible de la spatule ou du bâtonnet en mélangeant le Diluant Echantillon ; presser l'écouvillon contre la paroi du tube pour récupérer le liquide résiduel.

Echantillons liquides: transférer 300 µL d'échantillon dans le tube. S'assurer que l'échantillon est mélangé de manière homogène.

6. Bien mélanger (vortex) le tube pour assurer l'échantillonnage adéquat.

7. Laisser le tube reposer pendant au moins 10 minutes. Centrifuger les tubes à 1000 g pendant 30 secondes. S'assurer que le surnageant ainsi formé ne contienne aucune particule de grande taille.
8. Transférer les tubes sur leurs racks respectifs sur l'automate.

C. Incubation du conjugué avec les échantillons de selles et les contrôles.

Déposer le conjugué prêt à l'emploi et les échantillons sur la plaque (4 barrettes maximum). Procéder comme suit :

9. Distribuer 50µL de conjugué prêt à l'emploi dans chaque puits (4 barrettes maximum).
10. Déposer 100µL de contrôle positif et 100µL de contrôle négatif (Diluant Echantillon) dans des puits différents (contenant le conjugué).
11. Déposer 100µL d'échantillon dilué dans des puits différents parmi les barrettes du groupe (4 barrettes max).
12. Répéter la distribution de conjugué et le dépôt des échantillons sur les 4 barrettes suivantes puis à nouveau sur les 4 dernières barrettes (voir étapes 9 à 11).
13. Incuber la plaque **30 minutes** à 37°C.
14. Effectuer 5 X 300µL cycles de lavage avec le tampon de lavage pré-dilué.
15. Effectuer deux cycles d'aspiration circulaire.

D. Incubation du substrat TMB

16. Distribuer 100µL de substrat TMB dans chaque puits. Incuber à température ambiante pendant 15 minutes.
17. Arrêter la réaction en ajoutant 100µL de solution d'arrêt (1M H₂SO₄) dans chaque puits.

E. Lecture

18. Lire la densité optique de chaque puits à 450nm/620nm, puis enregistrer les résultats.

Noter que chaque automate possède des spécifications techniques propres. Pour l'utilisation de ce coffret avec votre

automate, veuillez adapter cette procédure de test sur votre instrument.

Critères d'acceptabilité du test

Pour que le test soit valide, les critères ci-après doivent être remplis. Si ces conditions ne sont pas retrouvées, le test doit être considéré comme non conforme et renouvelé.

Contrôle négatif:

L'absorbance doit être $\leq 0,07$ à 450/620 nm.

Contrôle positif:

L'absorbance doit être $\geq 0,5$ à 450/620 nm.

Interprétation des résultats

	Echantillons négatifs	Echantillons positifs
DO à 450/620nm	<0.08	≥ 0.08

Limitations

1. Le kit CoproELISA™ *C. difficile* GDH permet la détection de l'antigène GDH de *C. difficile* dans les selles. Cette détection doit être prise en compte par le médecin, en plus de l'historique médical du patient, avant d'effectuer tout diagnostic. L'incapacité à détecter la GDH dans les échantillons de selles ne doit pas exclure un diagnostic de cette maladie ; ceci peut être dû à un mauvais traitement des échantillons ou à une mauvaise conservation des échantillons. Il est aussi possible que le taux de GDH soit en dessous de la limite de détection du kit. Le kit CoproELISA™ *C. difficile* GDH permet une détection de GDH dans les selles à une concentration ≥ 1 ng/puits.
2. La stabilité de la protéine GDH de *C. difficile* dans les échantillons de selles peut être altérée. Pour cette raison, il est important de conserver les échantillons entre +2°C et +8°C après le recueil. Les échantillons qui ne peuvent être analysés dans les 48 heures doivent être congelés.
3. Certains échantillons peuvent donner des résultats faibles. Ceci peut être dû, notamment, à une concentration faible en bactéries ou à certains facteurs dans les selles qui interfèrent avec les protéines GDH ou le test. Dans ce cas, renouveler l'analyse à partir d'un échantillon frais.

Performance du test

Etude 1 et 2: Des échantillons de selles ont été évalués par le kit CoproELISA™ *C. difficile* GDH. L'étude 1 portait sur 90 échantillons sur un site A (Tableau 1) et l'étude 2 portait sur 56 échantillons sur un site B (Tableau 2). Les résultats ci-dessous ont été comparés à un kit ELISA de référence (validé par la FDA).

Tableau 1: Site A

		ref. kit		
		positif	négatif	total
CoproELISA™ <i>C. difficile</i> GDH	positif	57	0	57
	négatif	3	30	33
	total	60	30	90

Sensibilité: 95 %, Spécificité: 100 %

Valeur Prédictive Positive (VPP): 100%,

Valeur Prédictive Négative (VPN): 91%

Tableau 2: Site B

		ref. kit		
		positif	négatif	total
CoproELISA™ <i>C. difficile</i> GDH	positif	29	1	30
	négatif	1	25	26
	total	30	26	56

Sensibilité: 96.7 %, Spécificité: 96.2 %

VPP: 96.7 %, VPN: 96.2 %

Etude 3: Des échantillons de selles ont été évalués avec le kit CoproELISA™ *C. difficile* GDH. L'étude portait sur un total de 298 échantillons (Tableau 3) dans un laboratoire référence pour *Clostridium difficile* (Paris). Les résultats présentés ci-après ont été comparés aux résultats d'une culture sur milieu sélectif (test de référence).

Tableau 3:

		Culture		
		positif	négatif	total
CoproELISA™ <i>C. difficile</i> GDH	positif	31	19	50
	négatif	1	247	248
	total	32	266	298

Sensibilité: 96.9 %, Spécificité: 92.9 %

VPP: 62 %, VPN: 99.5 %

Réactions croisées


Le kit CoproELISA™ *C. difficile* GDH a été évalué à partir de cultures microbiennes et à partir d'échantillons de selles. Aucune réaction croisée avec des pathogènes et microorganismes gastro-intestinaux listés ci-dessous n'a été observée :

Blastocystis, *Campylobacter**, *Cryptosporidium parvum**, *Dientamoeba fragilis**, *Escherichia coli*, *Entamoeba histolitica**, *Enterococcus faecali*, *Enterococcus faesium*, *Enterococcus avium*, *Enterococcus aerogenes*, *Enterococcus cloacae*, *Enterococcus gallinarum*, *Enterococcus durans*, *Giardia lamblia**, *Helicobacter pylori**, *Klebsiella pneumonia*, *Salmonella enterica**, and *Shigella**.

Bibliographie

1. Cloud J, Kelly CP. Update on *Clostridium difficile* associated disease. Curr Opin Gastroenterol. 2007 Jan;23(1):4-9.
2. Owens RC Jr, Donskey CJ, Gaynes RP, Loo VG, Muto CA. Antimicrobial-associated risk factors for *Clostridium difficile* infection. Clin Infect Dis. 2008 Jan 15;46 Suppl 1:S19-31.
3. Kelly CP, Pothoulakis C, LaMont JT. *Clostridium difficile colitis*. N Engl J Med. 1994 Jan 27;330(4):257-62
4. Voth DE, Ballard JD. *Clostridium difficile* toxins: mechanism of action and role in disease. Clin Microbiol Rev. 2005 Apr;18(2):247-63.
5. Savidge TC, Pan WH, Newman P, O'brien M, Anton PM, Pothoulakis C. *Clostridium difficile* toxin B is an inflammatory enterotoxin in human intestine. Gastroenterology. 2003 Aug;125(2):413-20.
6. Pituch H, van den Braak N, van Leeuwen W, van Belkum A, Martirosian G, Obuch-Woszczatyński P, Łuczak M, Meisel-Mikołajczyk F. Clonal dissemination of a toxin-A-negative/toxin-B-positive *Clostridium difficile* strain from patients with antibiotic-associated diarrhea in Poland. Clin Microbiol Infect. 2001 Aug;7(8):442-6.

7. Shin BM, Kuak EY, Yoo SJ, Shin WC, Yoo HM., Emerging toxin A-B+ variant strain of *Clostridium difficile* responsible for pseudomembranous colitis at a tertiary care hospital in Korea. Diagn Microbiol Infect Dis. 2008 Apr;60(4):333-7.
8. Lysterly DM, Barroso LA, Wilkins TD. Identification of the latex test-reactive protein of *Clostridium difficile* as glutamate dehydrogenase. J Clin Microbiol. 1991 Nov;29(11):2639-42.
9. Carman RJ, Wickham KN, Chen L, Lawrence AM, Boone JH, Wilkins TD, Kerkering TM, Lysterly DM. Glutamate dehydrogenase is highly conserved among *Clostridium difficile* ribotypes. J Clin Microbiol. 2012 Apr;50(4):1425-6.

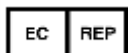

Représant agréé européen: Obelis s.a.

Boulevard Général Wahis 53

1030 Brussels, BELGIUM

Tel: +(32) 2. 732.59.54

Fax: +(32) 2.732.60.03

E-Mail : mail@obelis.net

	Limites de température
	Consulter les instructions d'utilisation
	Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>
	Fabricant
	Représentant