

CoproStrip *H. pylori* Contrôle positif **N° de catalogue 41221-10**

UTILISATION PRÉVUE

Le contrôle positif CoproStrip *H. pylori* (Cat#41221-10) constitue un contrôle de qualité externe pour le kit CoproStrip *H. pylori* (Cat#41221).

PRINCIPES

Le contrôle positif CoproStrip *H. pylori* est composé d'un flacon contenant l'antigène inactivé *H.pylori*.

PRÉCAUTIONS

- Réservé à un usage de diagnostic *in vitro* uniquement.
- Ne l'utilisez pas après la date d'expiration.
- À utiliser uniquement avec le kit Savyon CoproStrip *H. pylori* (Cat#41221).
- Le flacon doit rester fermé jusqu'à son utilisation.
- Veuillez respecter les bonnes pratiques de laboratoire, portez des vêtements de protection, utilisez des gants d'élimination, ne pas manger, boire ou fumer dans la zone.
- Tous les spécimens doivent être considérés comme potentiellement dangereux et traités de la même manière qu'un agent infectieux.
- Après le test, le flacon doit être jeté dans un récipient approprié destiné aux déchets biologiques.

STOCKAGE ET STABILITÉ

Veuillez conserver le flacon de solution CoproStrip *H. pylori* Contrôle positif à une température réfrigérée (2- 8°C). Le contrôle positif *H. pylori* reste stable jusqu'à la date d'expiration imprimée sur l'étiquette de la boîte.
Ne pas le congeler.

MATÉRIAUX FOURNIS


Le contrôle positif CoproStrip *H. pylori* de Savyon contient : 3,2 mL de solution d'antigène *H. pylori*.

PROCÉDURES

Veuillez laisser le flacon de contrôle positif atteindre la température ambiante (15-30°C) avant de le tester .
Ne pas ouvrir l'étui contenant le test avant de procéder à l'analyse.


Veuillez retirer la cassette CoproStrip *H. pylori* de l'étui et la placer sur la table de travail .Veuillez secouer le flacon de contrôle positif pendant plusieurs secondes avant de procéder au test. V.Veuillez ajouter **4 gouttes** (≈160µl) de la solution de contrôle positif *H. pylori* CoproStrip dans le puits du test (indiqué par S) et ce, avec précaution (voir illustration 1). Veuillez à l'écoulement normal des liquides lors du déroulement du test. Consultez les résultats après 10 minutes (voir illustration 2).

Illustration 1

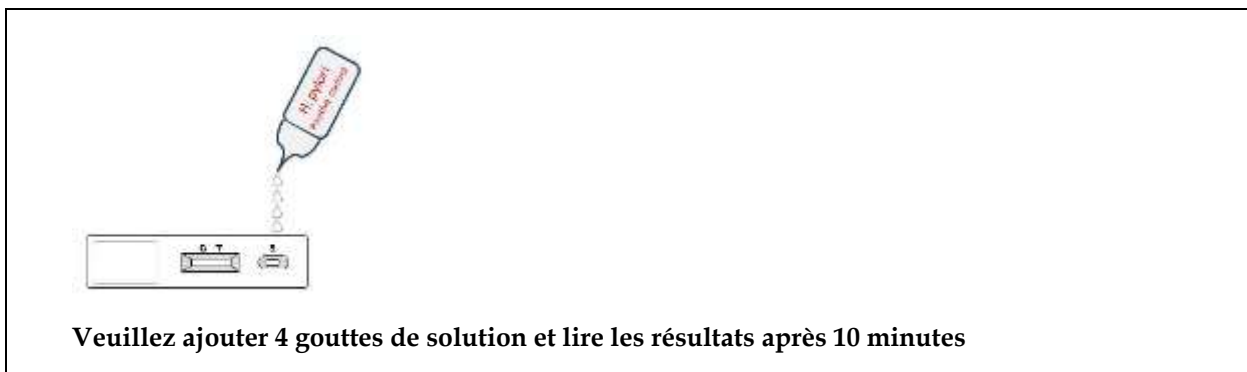

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Illustration 2

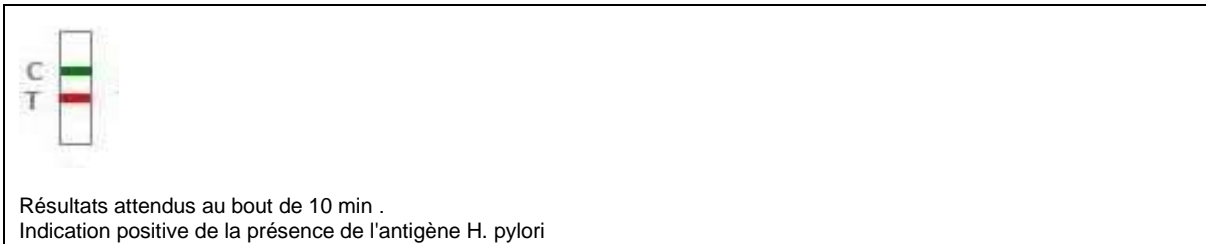

CONTRÔLE POSITIF :









Deux lignes apparaissent sur la bandelette de test .Une ligne de test rouge indiquée dans l'illustration par la lettre T dans la zone de test et une ligne de contrôle **verte** (indiquée dans l'illustration par la lettre C dans la zone de contrôle).

Dans le cas où une seule ligne verte (CONTROL) apparaît, veuillez contacter votre distributeur local.

INVALIDE : Il est à noter que la ligne de contrôle verte peut être totalement absente, indépendamment de l'apparition ou non de la ligne de test rouge dans chaque bande.

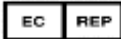Note : Des techniques procédurales incorrectes ou la détérioration des réactifs constituent les raisons les plus probables de l'échec ou des variations des contrôles positifs. Veuillez revoir la procédure et refaire l'analyse avec un nouveau test. Si le problème persiste, cessez d'utiliser le kit de test et contactez votre distributeur local.


L'intensité des lignes rouges et vertes peut varier lors de l'utilisation d'une même bandelette de test.

Symboles des composants et réactifs de DIV			
	Fabricant		Réservé à un usage de diagnostic <i>in vitro</i> uniquement.
	Représentant autorisé		Veuillez consulter le mode d'emploi
	Code du catalogue		Limitation de température
	Numéro de lot		Utilisé par



Savyon® Diagnostics Ltd.

3 Habosem St. Ashdod 7761003
ISRAËL
Tél : +972.8.8562920
Fax : +972.8.8523176
E-mail : support@savyondiagnosics.com

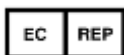

Représentant européen autorisé : Obelis s.a.

Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Bruxelles
Tél : +32.2.732.59.54 Fax : +32.2.732.60.03
E-mail : mail@obelis.net